

REF L031-118M5	REF L031-118N5	REF L031-118W5	Česky
REF L031-118P5	REF L031-118Y5	REF L031-118Z5	
REF L031-118R5			

Rychlý test na detekci nukleokapsidových antigenů SARS-CoV-2 ve vzorcích předního nosního výtěru.

Určeno pouze pro diagnostické použití in vitro. Pro vlastní testování.

Před provedením testu si pečlivě přečtěte pokyny.

Dodané materiály	Množství (ks)						
	1 T	2 T	3 T	5 T	7 T	20 T	25 T
Testovací Kazeta	1	2	3	5	7	20	25
Zkumavka s Extrakčním Pufrem	1	2	3	5	7	20	25
Jednorázová Tyčinka	1	2	3	5	7	20	25
Sáček na Odpad	1	2	3	5	7	20	25
Držák Zkumavky	/	/	/	/	/	1	1
Příbalový Leták	1	1	1	1	1	1	1

Potřebný materiál,
který není součástí
balení

Časovač

**INSTRUKČNÍ
VIDEO:**




PŘÍPRAVA

1.



Umyjte si nebo vydezinfikujte si ruce. Před zahájením testu se ujistěte, že jsou suché.

2.

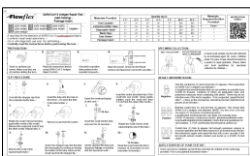


Před použitím sady rychlého testu na antigen SARS-CoV-2 si přečtěte pokyny.

3.



Zkontrolujte datum expirace vytištěné na kazetovém foliovém pouzdru.

4.

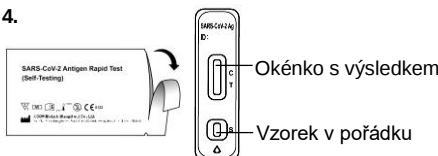

Otevřete sáček. Zkontrolujte okénko s výsledkem a jamku vzorku na kazetě.

ODBĚR VZORKŮ

SAMOSTATNÝ ODBĚR



**ODBĚR DOSPĚLÝM
OŠETŘOVATELEM**



Vzorek výtěru z nosu si může sám odebrat jedinec ve věku nad 18 let. U dětí mladších 18 let by to měl provádět rodič nebo zákonný zástupce. Při odběru vzorků dětmi postupujte podle místních pokynů.


POSTUP TESTU

1.




Odstraňte hliníkovou fólii z horní části zkumavky s extrakčním pufrem.

2.

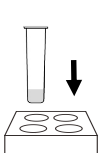

Vložte zkumavku do otvoru v krabici sady. (Nebo vložte zkumavku do držáku trubičky.)

3.

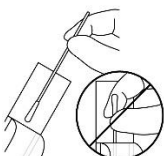


Otevřete obal výtěrového tamponu na konci tyčinky.

4.



Vložte celou absorpční špičku výtěrového tamponu do jedné nosní dírky. Jemným otáčením zatlačte výtěrový tampon méně než 2,5 cm od okraje nosní dírky.

5.

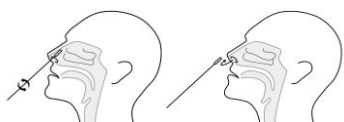


Otáčejte výtěrovým tamponem 5krát a přejíždějte s ním proti vnitřní straně nosní dírky. Vyměňte výtěrový tampon a vložte jej do druhé nosní dírky. Opakujte krok 4.

6.




Vyměňte výtěrový tampon z nosní dírky.

7.

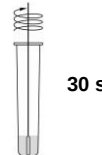

Vložte výtěrový tampon do zkumavky a míchejte po dobu 30 sekund.

8.

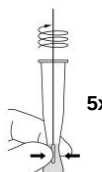

Otáčejte tamponem 5krát a současně mačkejte stranu zkumavky.

9.




Vyměňte tampon a současně stlačte zkumavku.

10.



Připojte pevně hrot kapátka na zkumavku s extrakčním pufrem obsahujícím vzorek. Důkladně promíchejte kroužením nebo poklepáváním na dno zkumavky.

11.

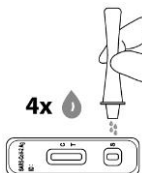

Jemně stlačte zkumavku a nakapajte 4 kapky roztoku do jamky na vzorek.

12.



15-30 min.


Po 15-30 minut odečtěte výsledek. Nečtěte po 30 minutách.

INTERPRETACE VÝSLEDKU




Negativní

Zobrazuje se pouze kontrolní linie (C) a testovací linie (T) ne. To znamená, že nebyl detekován žádný antigen SARS-CoV-2. Negativní výsledek testu naznačuje, že v současné době pravděpodobně nemáte onemocnění COVID-19. Při kontaktu s ostatními nadále dodržujte všechna příslušná pravidla a ochranná opatření. Infekci můžete mít, i když je test negativní. Pokud máte podezření, test opakujte po 1 - 2 dnech, protože koronavirus nelze přesně detekovat ve všech fázích infekce.

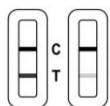

Pozitivní

Zobrazuje se kontrolní linie (C) a testovací linie (T). To znamená, že byl detekován antigen SARS-CoV-2. POZNÁMKA: Jakákoli slabá čára v oblasti testovací linie (T) by měla být považována za pozitivní. Pozitivní výsledek testu znamená, že je velmi pravděpodobné, že v současné době máte onemocnění COVID-19. Okamžitě kontaktujte svého lékaře / praktického lékaře nebo místní zdravotní oddělení. Postupujte podle místních pokynů pro sebeizolaci. Je třeba provést potvrzovací test PCR.

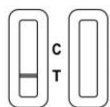

Neplatný

Kontrolní linie (C) se nezobrazuje. Pravděpodobným důvodem neplatného výsledku je nedostatek objemu vzorku nebo nesprávná operace. Znovu si přečtěte pokyny a opakujte test s novou kazetou. Pokud jsou výsledky testu stále neplatné, kontaktujte svého lékaře nebo testovací centrum COVID-19.

TESTOVACÍ SADU BEZPEČNĚ ZLIKVIDUJTE

Po dokončení testu vložte veškerý použitý obsah testovací sady do přiloženého sáčku na odpad. Vložte do běžného domácího odpadu.

